


Link do produktu: <https://hypoxy.pl/generator-hipoksyjny-z-akcesoriami-i-namiotem-do-treningu-p-41.html>

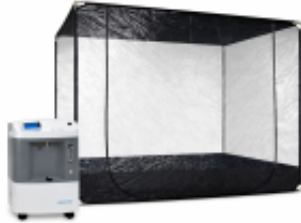

Generator hipoksyjny z akcesoriami i namiotem do treningu

Cena brutto	17 800,00 zł
Cena netto	14 471,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LON_JAY10H

Opis produktu



Generator hipoksyjny JAY-10H — przepływ 100 l/min, regulacja tlenu 9-20,9% O₂

Generator hipoksyjny JAY-10H - jak działa?

Generator hipoksyjny JAY 10H rozdziela powietrze atmosferyczne na dwa strumienie: powietrze hipoksyjne (o obniżonej zawartości tlenu, 9-20,9% O₂) i powietrze hiperoksyjne. Użytkownik oddycha powietrzem hipoksyjnym przez maskę oddechową, co symuluje warunki atmosferyczne na wysokościach do 6 500 m n.p.m. Wszystko odbywa się na poziomie morza - bez dekompresji, bez ryzyka choroby wysokościowej.

Dzięki regulowanemu przepływowi 100 l/min i rezerwuarowi 100 litrów urządzenie zapewnia stabilne i nieprzerwane oddychanie nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego.





Czym jest trening IHT (Intermittent Hypoxic Training)?

Trening przerywanej hipoksji (IHT) polega na naprzemiennym oddychaniu powietrzem o obniżonej i normalnej zawartości tlenu. Regularne sesje IHT prowadzą do szeregu adaptacji fizjologicznych:

- Wzrost produkcji czerwonych krwinek (erytropoeza) i stężenia hemoglobiny
- Poprawa **VO2max** - wydolności tlenowej organizmu
- Lepsze utlenowanie tkanek i efektywniejszy transport tlenu
- Wzmocnienie funkcji mitochondrialnych i metabolizmu energetycznego
- Opóźnienie progu zmęczenia podczas wysiłku
- Wsparcie regeneracji mięśni po treningu

Tłumik wyciszający

Kompaktowy tłumik montowany na przewodzie wylotowym powietrza z generatora hipoksyjnego. Redukuje hałas przepływu powietrza podczas jego wprowadzenia do namiotu, znacząco poprawiając komfort użytkownika - szczególnie podczas snu.

Działa bez zasilania, nie wpływa na parametry przepływu ani poziom hipoksji. Prosty montaż na standardowych przewodach.

Kluczowe cechy generatora hipoksyjnego



Symulacja wysokości
nawet do 6500 m n.p.m.



Rezerwuar 100 l
stabilny przepływ powietrza



Przepływ do 100 l/min
odpowiedni do intensywnego treningu




Regulacja tlenu 9-20,9%
pełna kontrola treningu hipoksyjnego



Zestaw akcesoriów
(maska, filtry, węże, worki buforowe) komfort i higiena



Kompaktowa konstrukcja z kółkami
mobilność i wygoda

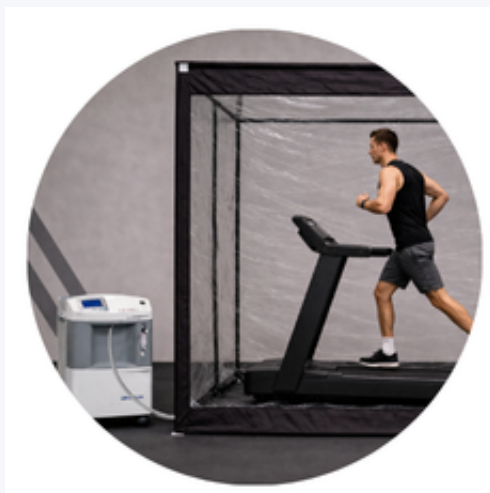

Trening w warunkach normobarycznych
bez konieczności wyjazdu w góry



Opcja hiperoksji
możliwość regeneracji po treningu w hipoksji

Dla kogo jest Generator hipoksyjny JAY-10H?



Sportowcy wytrzymałościowi i kolarze:

zwiększenie VO₂max, opóźnienie zmęczenia, poprawa transportu tlenu.



Alpiniści i himalaiści:

przygotowanie organizmu do warunków wysokogórskich bez wyjazdu w góry.



Biohackerzy i longevity:

wsparcie funkcji mitochondrialnych, optymalizacja metabolizmu, spowolnienie procesów starzenia.



Gabinetv wellness. kliniki medycyny naturalnej. centra sportowe:

urządzenie gotowe do użytku komercyjnego, certyfikat CE, serwis PL.



Trenerzy personalni i fizjoterapeuci:

indywidualna kontrola parametrów treningu oddechowego i rehabilitacji.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	JAY-10H
Moc znamionowa	550 VA
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Przepływ powietrza	do 100 l/min
Zakres regulacji tlenu	9-20,9% O ₂
Symulacja wysokości	do 6 500 m n.p.m.
Pojemność rezerwuaru	100 litrów
Wymiary	365 × 375 × 600 mm
Waga netto	27 kg
Certyfikat	CE (normy UE)
Gwarancja	24 miesiące
Serwis	Polska

Zestaw zawiera

- Generator hipoksyjny
- Rezerwuar 100l
- Maska oddechowa (rozmiar L) z paskiem neoprenowym
- Dwa przewody dostarczające powietrze
- Łącznik przewodów powietrznych
- Kabel zasilający
- Filtr antybakteryjny
- Zapasowe filtry powietrza
- Tłumik wyciszający
- Namiot hipoksyjny do treningu i do spania

Dobierz do generatora namiot hipoksynv!


Wykorzystaj pełnię możliwości urządzenia wybierając również **namiot hipoksyjny**, który pozwala na spanie, trening bez użycia maski czy prowadzenie sesji regeneracyjnych w warunkach **niedoboru tlenu** - to dodatkowy element wspierający **adaptację i wydolność tlenową**.

Posiadamy w ofercie dwa rozmiary namiotów:

Namiot hipoksyjny do spania

[Kliknij tutaj aby przejść](#)




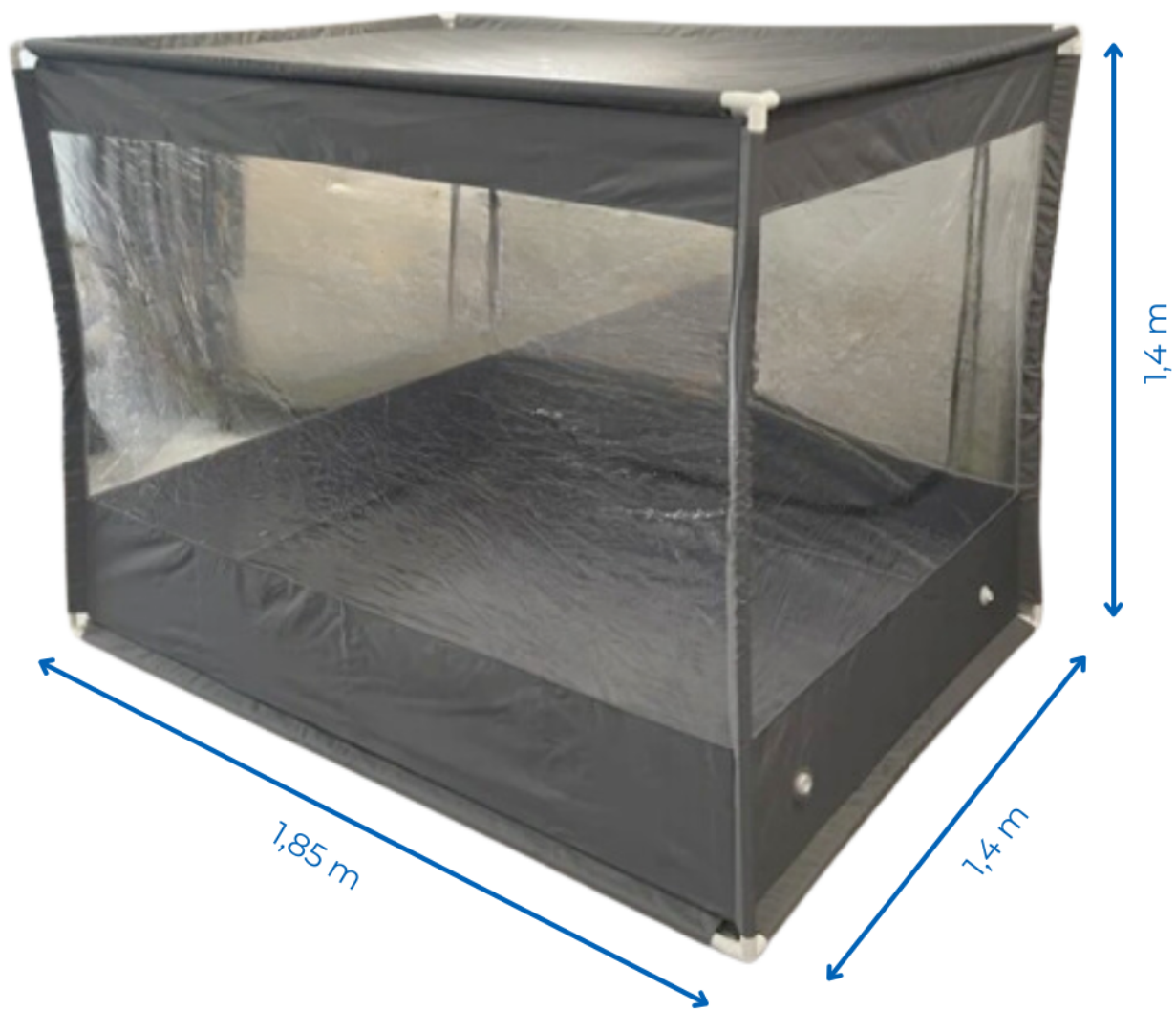

Namiot hipoksyjny do treningu

Kliknij tutaj aby przejść



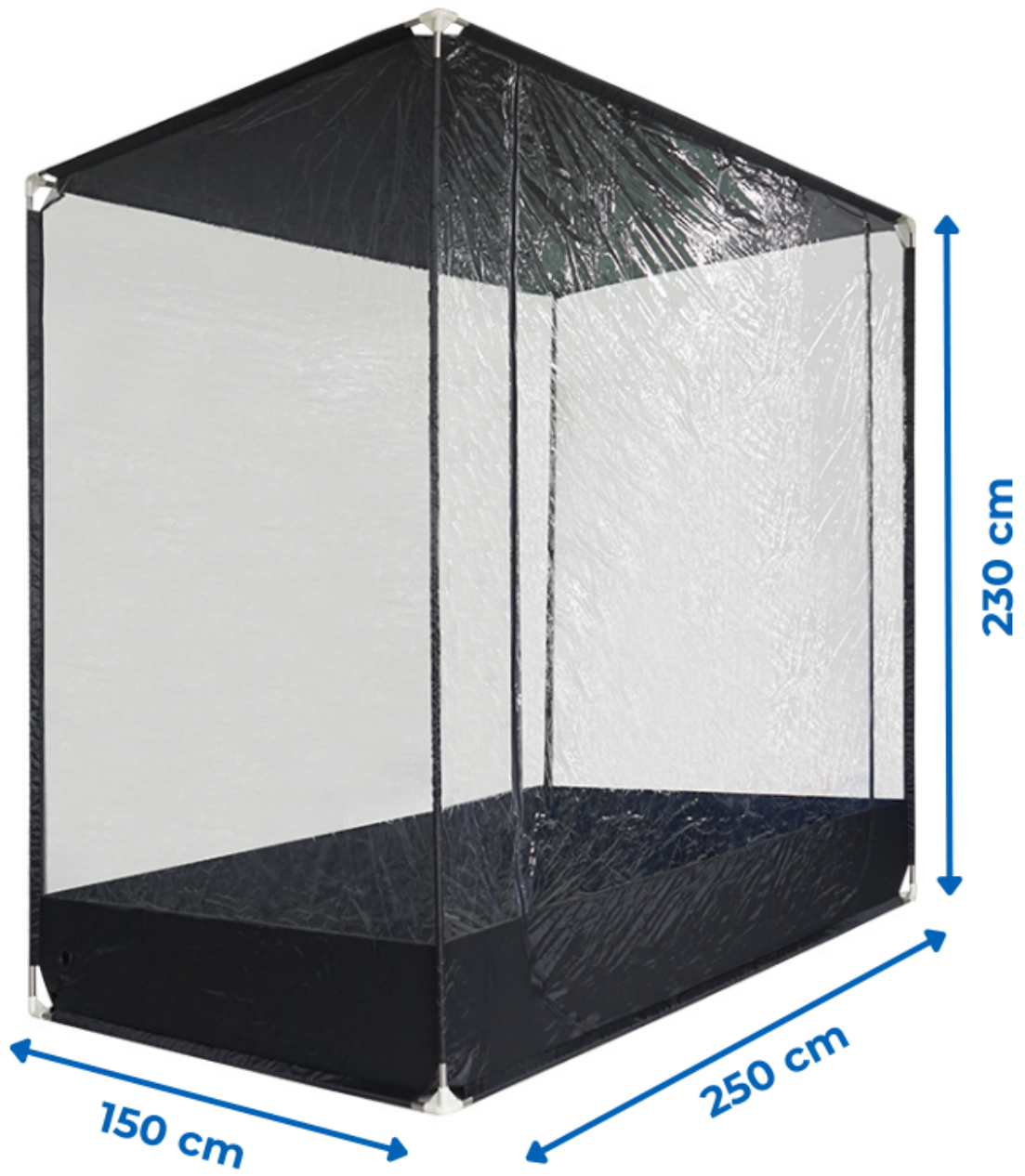

Dobierz namiot hipoksyjny i oszczędź 1 000 zł!

Zestaw Generator JAY-10H + Namiot hipoksyjny do spania lub do treningu w cenie 19 800 zł brutto (zamiast 20 800 zł). Namiot pozwala prowadzić sesje regeneracyjne i sen w warunkach hipoksji bez użycia maski.

Parametr / cecha
Przepływ powietrza
Stabilność tlenu
Zakres symulacji wysokości
Regulacja tlenu
Akcesoria w zestawie
Serwis i gwarancja
Wsparcie / wdrożenie
Komfort pracy
Realny koszt wejścia

Nasz generator
do 100 L/min (trening w ruchu)
✓ Stałe stężenie
do 6500 m n.p.m.
✓ Precyzyjna
✓ Kompletny zestaw
✓ 24 miesiące w PL
✓ Door-to-door
✓ Możliwość wyciszenia
✓ Brak ukrytych kosztów

Konkurencja
40–60 L/min (często tylko lekkie sesje)
✗ Wahania stężenia O₂
niższy zakres
✗ Skokowa / ograniczona
✗ Dodatkowo płatne
✗ Zagraniczna / brak
✗ Brak wsparcia
✗ Głośna praca
✗ Wyższy po dokupieniu

Pytania FAQ

Jak głęboka hipoksja jest możliwa przy ustawieniu 9% O₂?

Stężenie 9% O₂ odpowiada warunkom atmosferycznym na wysokości ok. 6 500 m n.p.m. — porównywalnym z bazowym obozem na Mount Everest. Dla początkujących zalecamy start od 15–16% O₂ i stopniowe obniżanie pod okiem konsultanta.

Czy generator hipoksyjny jest bezpieczny dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego?

Urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Przed rozpoczęciem treningu hipoksyjnego osoby z chorobami serca, nadciśnieniem lub innymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem.

Jaki poziom hałasu generuje urządzenie?

JAY-10H pracuje z poziomem hałasu typowym dla koncentratorów tlenu tej klasy (ok. 40–45 dB), porównywalnym do rozmowy. Większość użytkowników stosuje go bez zakłóceń podczas treningu lub w oddzielnym pomieszczeniu. Nasze zestawy z namiotem zawierają tłumik, który znacząco obniża hałas, gdy korzystamy z generatora podłączonego do namiotu.

Jak długa powinna być sesja treningu hipoksyjnego?

Sesja IHT trwa zwykle 30–60 minut, natomiast pobyt w namiocie hipoksyjnym może wynosić od 1–2 godzin do kilkunastu godzin. Czas zawsze należy dopasować indywidualnie i zwiększać stopniowo.

Czym różni się generator hipoksyjny od namiotu hipoksyjnego?

Generator pozwala oddychać hipoksyjnym powietrzem przez maskę —

podczas treningu na siłowni, ćwiczeń czy spokojnego siedzenia. Namiot hipoksyjny tworzy środowisko obniżonego O₂ wokół Ciebie, co umożliwia sesje snu lub adaptacji bez maski. Oba urządzenia doskonale się uzupełniają — sprawdź nasze zestawy i oszczędź 1 000 zł.

Czy mogę kupić generator na raty?

Tak. Oferujemy raty 0% przez PayU oraz leasing dla firm. Skontaktuj się z nami: +48 789 666 339, aby dobrać najlepszą opcję finansowania.

DARMOWA KONSULTACJA W ZESTAWIE

Kupując lub wypożyczając generator hipoksji na min. 2 tygodnie, otrzymujesz bezpłatną 30-minutową konsultację z ekspertem.

W trakcie konsultacji:

- nauczysz się prawidłowej obsługi urządzenia
- poznasz zasady bezpiecznego treningu hipoksyjnego
- dowiesz się czym jest hipoksja i jakie daje korzyści

Dodatkowo

- indywidualne wskazówki treningowe
 - pomoc w doborze ustawień
- optymalne wykorzystanie sprzętu pod Twoje cele

**Masz więcej pytań lub wątpliwości?
Chcesz dobrać sprzęt do twoich potrzeb?
Zadzwoń: +48 789 666 339**



Serwis i Gwarancja w Polsce

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii

Europejskiej.

Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Jego użytkowanie w celach zdrowotnych jest dobrowolne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu w celach zdrowotnych zalecamy konsultację z lekarzem lub specjalistą. Użycie urządzenia w sposób wspierający zdrowie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz jego stanu zdrowia.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: Longfian Scitech Co., Ltd., 2F&3F, East Section, Building 12, Power Valley Pioneer Park, NO. 369 Huiyang Street, 071051, Boading, Hebei Province, China

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: FEMME MED KUŚNIERZ SP. J., ul. Rzeczna 8 / 1, 30-021 Kraków, KRS 0001019598, REGON 0000879155, NIP 6772460331, hypoxy@zdrawinalata.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, hypoxy@zdrawinalata.pl